

ACUVUE®

עדשות המגע מספר 1 בעולם!

מבית ג'ונסון & ג'ונסון

1. Euromonitor International; מהדורת Eyewear 2019, הנתונים משנת 2017 מתייחסים לכלל מוצרי המותג אקיוביו, במכירות מצטברות במחיר המכירה הקמעונאי, בכל הערוצים, של המותגים הבאים בדרגת שמוות מותגים גלובליים: ACUVUE OASYS®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE®, ACUVUE® Advance 2-1, ACUVUE®.


* כל עדשות המגע ממותג ACUVUE® הינן בעלות חסימת UV מדרגה 1 או 2 ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. המשיכו להשתמש במשקפי שמש חוסמי UV כפי שהומלץ לכם על ידי המומחה לבריאות העין.

EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS, ACUVUE® הינם שמות מסחריים של ג'יי סי הלתי קר בע"מ © ג'יי סי הלתי קר בע"מ 2020. A&R-leaflet-06-20.


הסרה




1 שטוף את ידיך היטב עם סבון ויבש אותן עם מגבת נקיה שלא משאירה סיבים

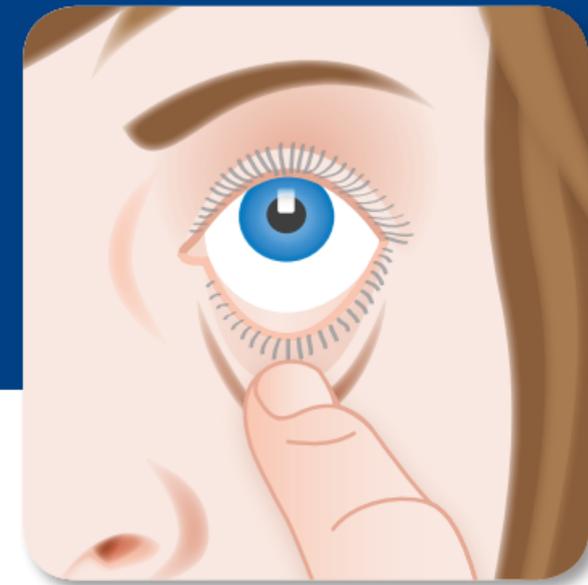

2 הבט למעלה ומשוך את העפעף התחתון למטה עם האצבע האמצעית

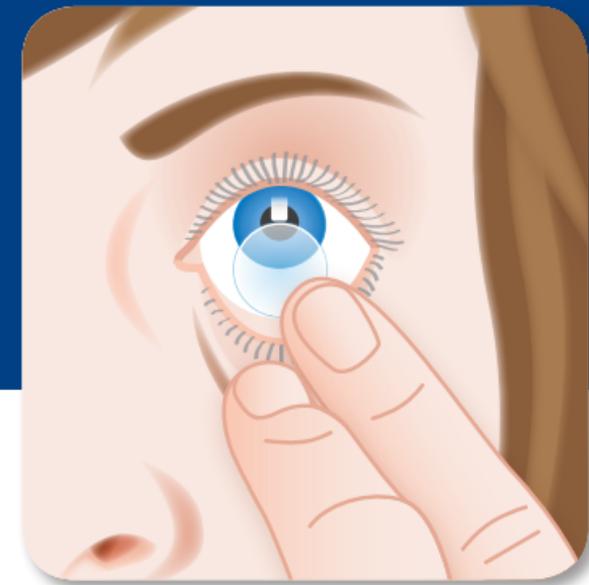

3 מקם את האצבע המורה על הקצה התחתון של העדשה. החלק את העדשה למטה עד לאזור הלבן של העין

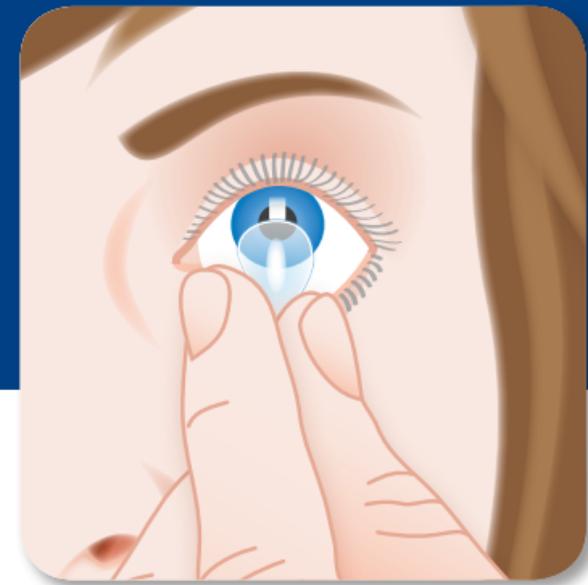

4 צבוט בעדינות את העדשה באמצעות האצבע המורה והאגודל והוצא את העדשה בזהירות



טיפ על מנת למנוע בלבול, תמיד התחל להרכיב ולהסיר את העדשות שלך בעין ימין

חשוב לזכור!

- יש לפעול תמיד לפי המלצת האופטומטריסט או רופא העיניים
- אין לאפשר מגע של מים עם עדשות המגע
- אין להרכיב עדשת מגע פגומה / קרועה
- אם עיניך אדומות או צורבות אין להרכיב עדשות מגע כלל ויש לפנות לרופא המטפל
- יש להימנע מהרכבת עדשות מגע שפג תוקפן
- אין לישון עם עדשות המגע
- יש לזכור להגיע לפגישות מעקב שגרתיות אצל האופטומטריסט או רופא העיניים

ACUVUE®

עדשות המגע מספר 1 בעולם!

מבית ג'ונסון & ג'ונסון



הרכבת והסרת עדשות מגע בקלות

מומלץ לפרוס מדריך זה למולך

לפני שמתחילים...

אנחנו שמחים על בחירתך
ב-ACUVUE® עדשות המגע
מספר 1 בעולם¹.

על מנת שהתחלה שלך תהיה קלה
אנו ממליצים לפנות מספיק זמן
לטובת הרכבה והסרה של עדשות
המגע עד השימוש בעדשות
המגע יהפוך לטבעי ופשוט.


אנו ממליצים לפחות בהתחלה
לבצע את ההרכבה וההסרה אל
מול מראה, כאשר מדריך זה למולך
ולבצע לפי השלבים עד שתרגיש/י
שאינ לך צורך בו.

אנחנו מאחלים לך שנים רבות של
הנאה מהחופש שעדשות המגע
מאפשרות.


הרכבה




1 שטוף את ידיך היטב עם סבון
ויבש אותן עם מגבת נקיה
שלא משאירה סיבים

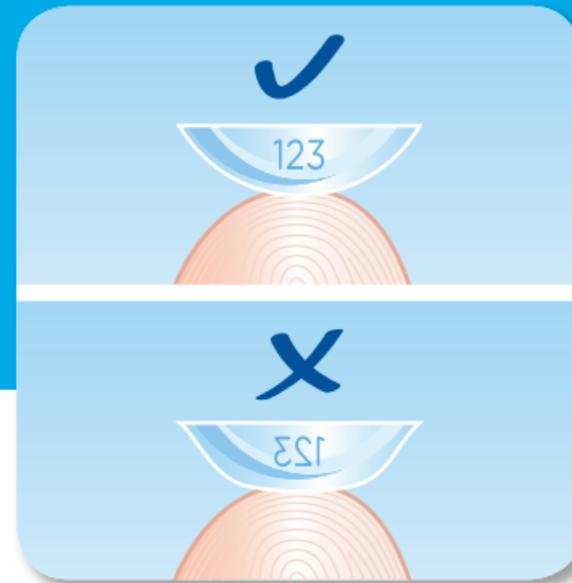


2 הוצא את העדשה מהמארז
שלה והנח אותה על קצה
האצבע המורה. ודא שהעדשה אינה
הפוכה. תוכל להשתמש בסימוני
1-2-3 שנמצאים על פני העדשה

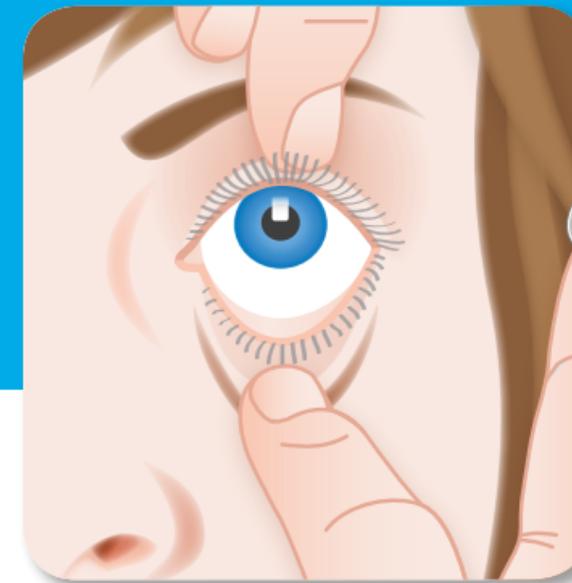

3 משוך את העפעף התחתון עם
האצבע האמצעית של אותה
היד שאוחזת בעדשה, הרם את
העפעף העליון עם האצבע המורה
של היד השניה והבט למעלה

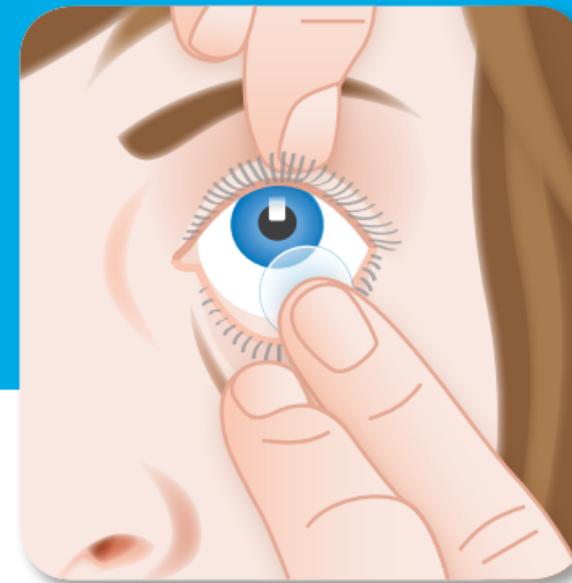

4 הנח את העדשה בעדינות על
האזור הלבן התחתון של העין
ושחרר את העפעפים

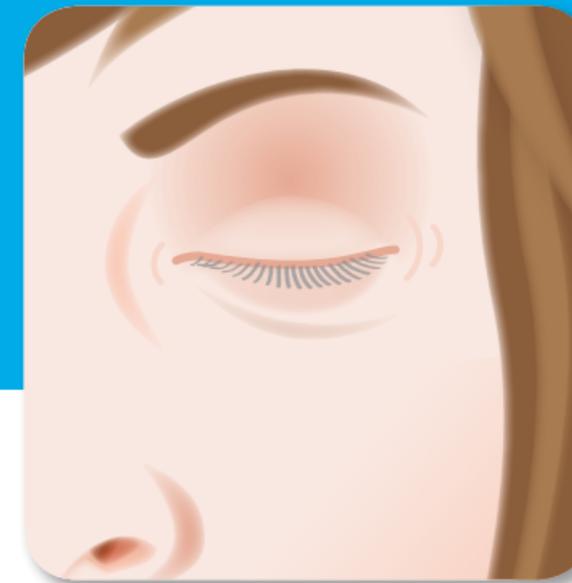

5 עצום את עיניך
ומצמץ מספר פעמים
על מנת למרכז את העדשה

צריכים עזרה נוספת ללמוד
כיצד מרכיבים ומסירים
עדשות מגע? סרקו את הקוד!



למידע נוסף על הרכבה בריאה של עדשות מגע,
בקרו ב: www.acuvue.co.il